




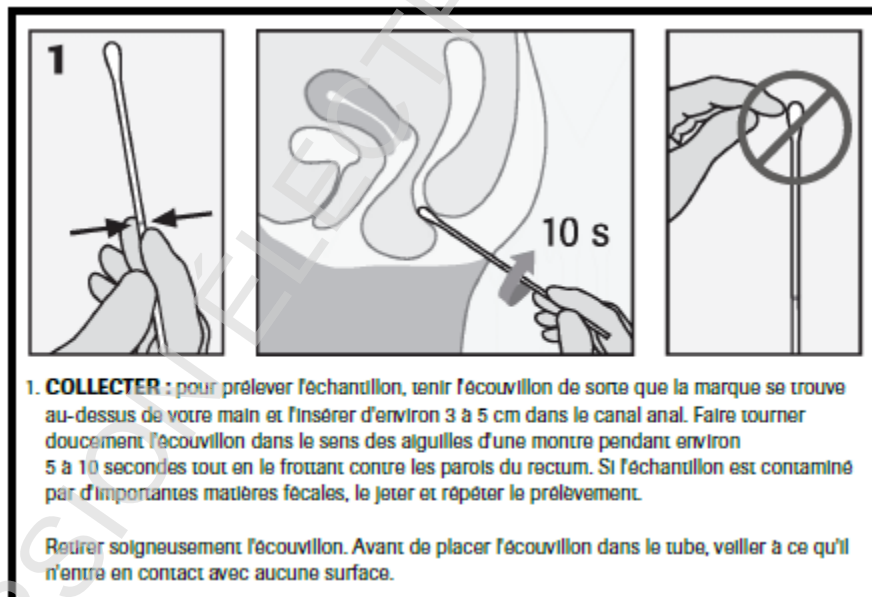


Guide de prélèvement rectal


Recommandations : Se laver les mains avant de réaliser l'auto-prélèvement. Ne pas humidifier l'écouvillon avant le prélèvement.

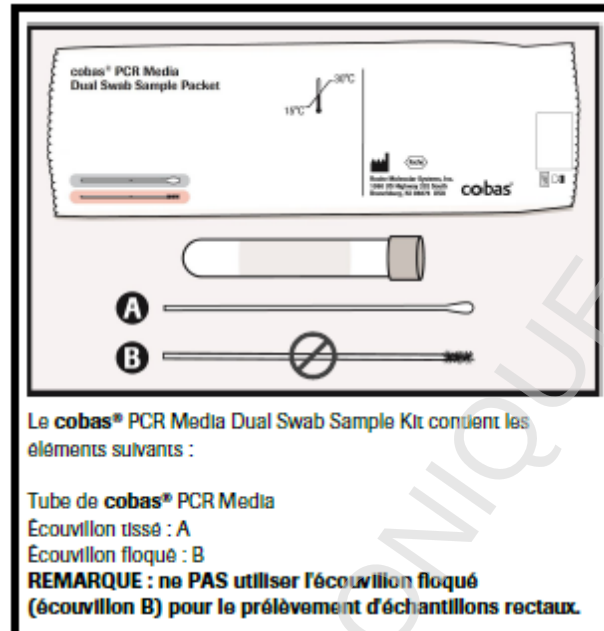

Tenez l'écouvillon comme le montre la photo ci-dessous en plaçant le pouce et l'index au milieu de la tige. Si l'écouvillon tombe demandez un nouvel écouvillon.

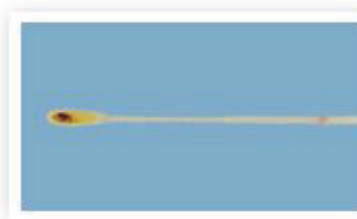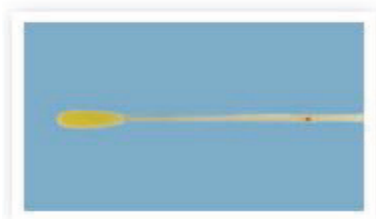


Exemples d'écouillons rectaux **acceptables**

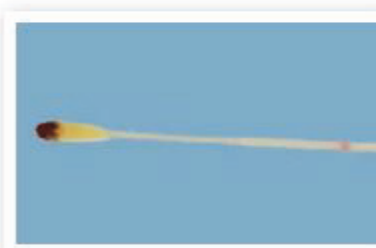

Exemples d'écouillons rectaux **non acceptables**


Pendant que vous tenez l'écouillon, dévissez le bouchon du tube et placez immédiatement l'écouillon dans le tube. Cassez précautionneusement la tige en la pressant contre le bord du tube comme le montre la photo ci-dessous.

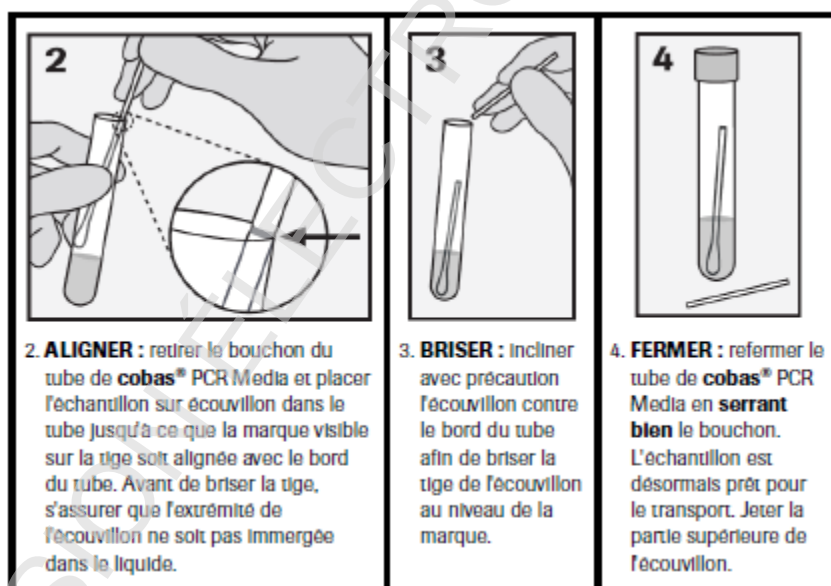


Transmettez-le au personnel soignant. L'échantillon doit être transporté entre 2°C et 30°C.

Guide de prélèvement buccal

Recommandations : Se laver les mains avant de réaliser l'auto-prélèvement. Ne pas humidifier l'écouillon avant le prélèvement.


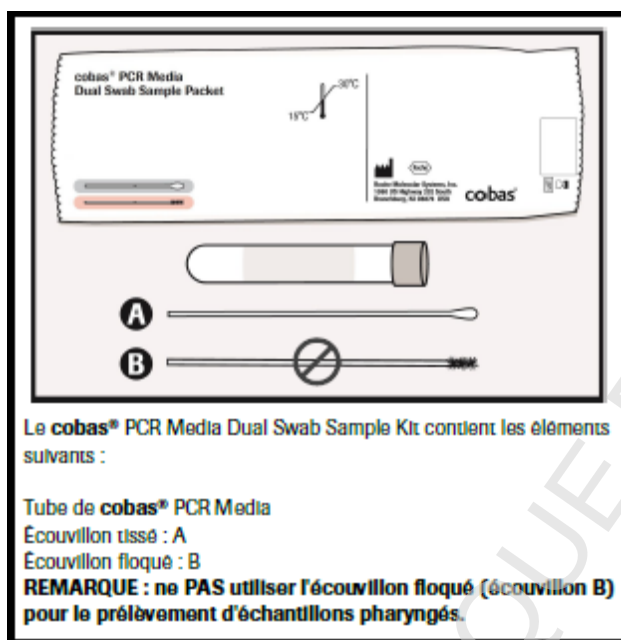


Tenez l'écouvillon comme le montre la photo ci-dessous en plaçant le pouce et l'index au milieu de la tige. Si l'écouvillon tombe demandez un nouvel écouvillon.
Ouvrir en grand la bouche. Positionnez la langue vers le bas de la bouche.

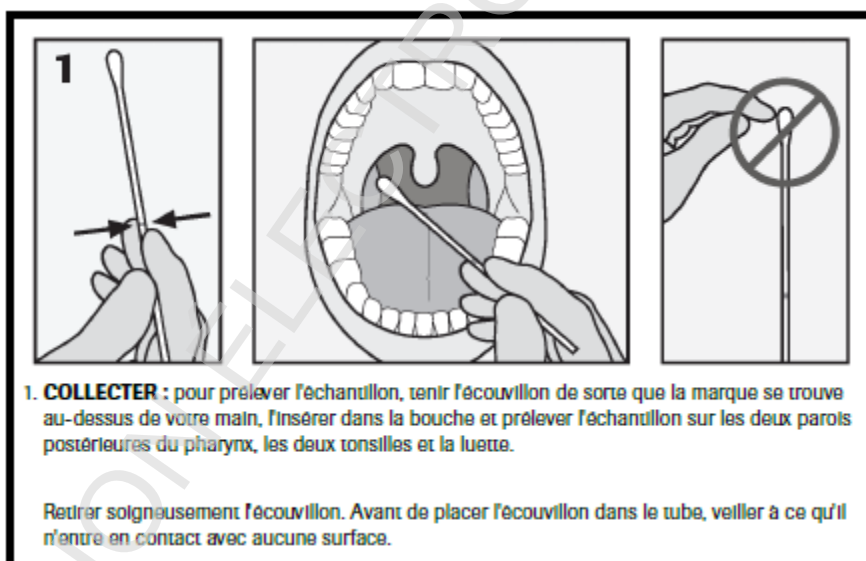

Pendant que vous tenez l'écouvillon, dévissez le bouchon du tube et placez immédiatement l'écouvillon dans le tube. Cassez précautionneusement la tige en la pressant contre le bord du tube comme le montre la photo ci-dessous.

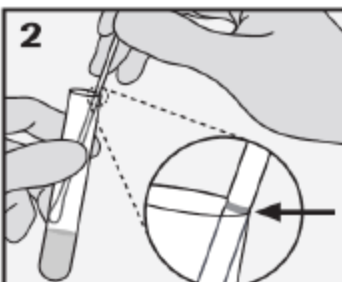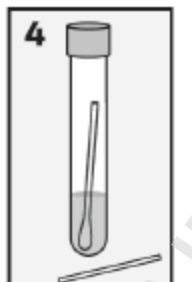

		
2. ALIGNER : retirer le bouchon du tube de cobas[®] PCR Media et placer l'échantillon sur écouvillon dans le tube jusqu'à ce que la marque visible sur la tige soit alignée avec le bord du tube. Avant de briser la tige, s'assurer que l'extrémité de l'écouvillon ne soit pas immergée dans le liquide.	3. BRISER : Incliner avec précaution l'écouvillon contre le bord du tube afin de briser la tige de l'écouvillon au niveau de la marque.	4. FERMER : refermer le tube de cobas[®] PCR Media en serrant bien le bouchon. L'échantillon est désormais prêt pour le transport. Jeter la partie supérieure de l'écouvillon.

Transmettez-le au personnel soignant. L'échantillon doit être transporté entre 2°C et 30°C.